



Wichtige Information: Es handelt sich hierbei um die Gewinnung von Mundschleimhautzellen für eine genetische Untersuchung. Und so einfach geht's:

- 1** Zu Beginn den Rachenraum gründlich mit Wasser durchspülen, um Speisereste zu entfernen (keinesfalls desinfizierende Lösungen verwenden). So wird eine Beeinflussung der Analyse ausgeschlossen.
- 2** Die Verpackung öffnen und den Watteträger herausnehmen. Dabei die Watte nicht mit den Fingern berühren. Den Watteträger nur einmal verwenden. Bitte mit allen beiliegenden Watteträgern einen Abstrich durchführen.
- 3** Mit genügend Druck mindestens 30 Sekunden lang die Wangeninnenseiten abstreifen (Umschlagfalte des Oberkiefers). Durch eine Hoch-/Tiefbewegung und Rotation genügend Zellen der Schleimhaut aufnehmen.
- 4** Nur benutzte Watteträger einsenden. Vor dem Versand bitte 2 Minuten trocknen lassen.

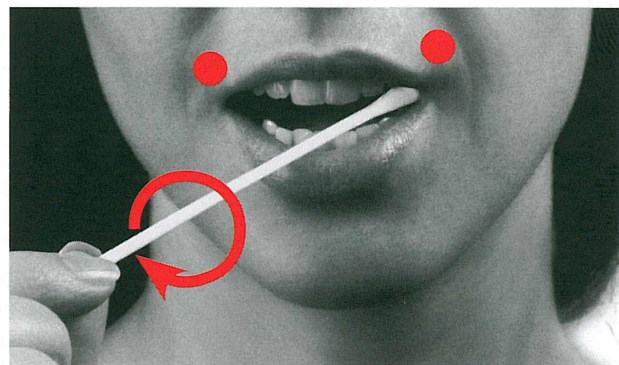

- 5** Bitte eines der beiden Etiketten (Strichcode-Aufkleber) aus der Einverständniserklärung in das Testfeld rechts (wie abgebildet) einkleben.

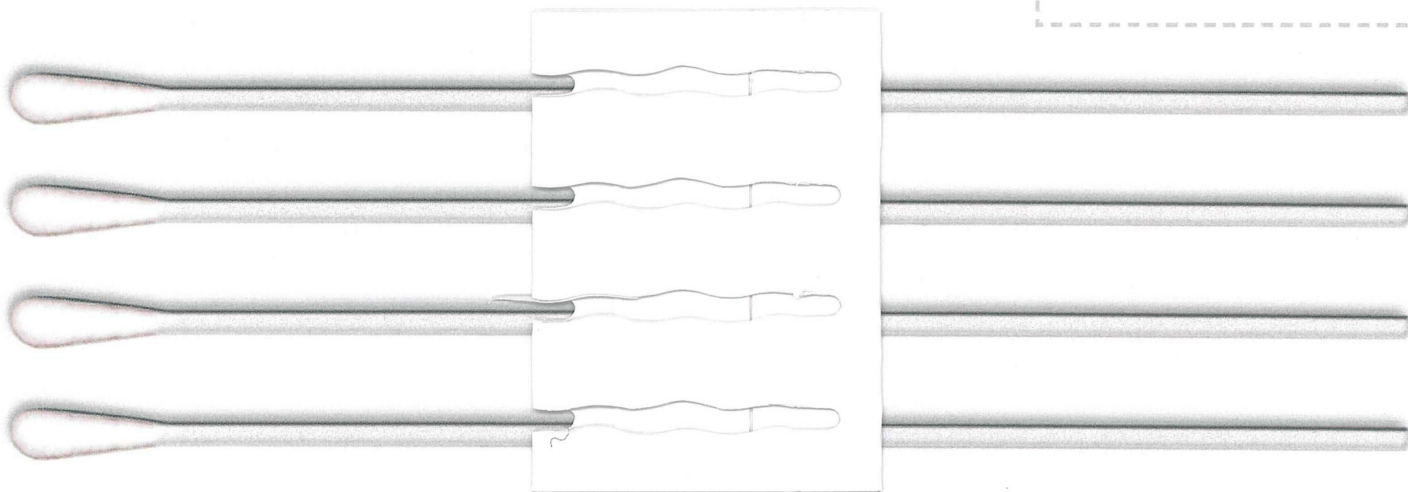

- 6** Die Karte (inkl. der Watteträger) mit dem Original Ihrer unterschriebenen Einverständniserklärung in den beiliegenden Umschlag stecken und an die angegebene Adresse schicken.